



## Test Bowie-Dick

### Test Bowie-Dick

Estos packs de test Bowie-Dick son packs de test de un solo uso, premontados, diseñados para evaluar el rendimiento del sistema de extracción de aire de los esterilizadores asistidos por pre-vacío de acuerdo con la norma EN 285 y funcionando a 134 °C y 3,5 minutos. Una hoja indicadora impresa con un indicador químico no tóxico a base de agua se coloca en el centro de cada paquete. El cambio de color uniforme del indicador después de la esterilización con vapor indica que todo el aire fue eliminado y reemplazado por vapor. El reverso de la hoja de indicadores contiene los campos a rellenar y se puede mantener como registro permanente a efectos de trazabilidad.

- Packs de test desechables, premontados y listos para usar
- Creados para la esterilización por VAPOR a 134 °C - 3,5 minutos.
- Cambio de color del indicador limpio y preciso
- La hoja del indicador se puede mantener como un registro permanente
- Validados para una carga de esterilización de 4 kg y 7 kg
- Fabricados en ausencia de plomo u otros metales pesados



Code	Description	Packaging
LLG06272290	Bowie & Dick test pack (4 kg) pack o/48	48 pz
LLG06272291	Bowie & Dicke Test Pack (7kg load) p/24	24 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

