



## Indicadores biológicos Attest para el control de los autoclaves de vapor

### Indicadores biológicos Attest para el control de los autoclaves de vapor

El control biológico implica el uso de indicadores, que comprueban si todos los microorganismos fueron eliminados durante el proceso de esterilización. Los bioindicadores son únicos, ya que indican directamente cuántas esporas microbianas han sido realmente eliminadas. Gracias a la fiabilidad y calidad de la información, el uso regular de un bioindicador puede conducir a una mejora en el rendimiento del proceso de esterilización y, por tanto, a mejores resultados.

#### Características:

- No se requiere ningún laboratorio externo para la evaluación del rendimiento
- Fáciles de manejar
- Razonable usar después de las reparaciones o el mantenimiento de los autoclaves

#### Aplicación:

- Programa 3,5 minutos, tiempo de mantenimiento a 121 °C o 134 °C
- Después de la esterilización, rompa el frasco para poner la solución de nutrientes en contacto con la tira de esporas
- Resultados en 48 horas
- Cumplen con la norma EN ISO 11138



Code	Description	Packaging
LLG06089578	Attest Biological indicators (damp)/100	100 pz.
LLG06280367	Attest Biological indicators, pack of 1	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

