

**Capillari per ematocrito****BRAND**

Capillari per ematocrito monouso - senza anello di calibrazione - non graduati - per uso con centrifughe per ematocrito - conformi a BS 4316-68 e DIN ISO 12 772 - marcati CE-IVD secondo direttiva 98/78/CE - disponibili eparinizzati: con sodio eparina all'interno di tutta la superficie, codice colore rosso, per sangue capillare oppure non eparinizzati, con codice colore blu, per uso con sangue venoso ed eparinizzato - lunghezza 75 mm  $\pm$  1 mm, spessore circa 0,2 mm, diametro interno 1,1  $\div$  1,2 mm, diametro esterno 1,5  $\div$  1,6 mm - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente.

**Suggerimenti per l'uso:**

- Chiusura del capillare riempito:

Tenere il capillare tra il pollice e l'indice appena sotto un'estremità. Premere delicatamente l'estremità non bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per risultati migliori: girare dolcemente e premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della piastra prima della centrifugazione.

- Centrifugazione:

I capillari vanno posti nella centrifuga con l'estremità sigillata all'esterno; si consiglia di osservare le istruzioni del produttore della centrifuga.

- Lettura del valore dell'ematocrito:

Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea delle cellule scure del sangue. Questo facilita la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

